

Multi-Gyn® KOMPRESSEN



BITTE LESEN SIE VOR JEDER ANWENDUNG VON MULTI-GYN KOMPRESSEN DIESES INFORMATIONSBLATT SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE ES AUF.

Multi-Gyn Kompressen

- Schnelle Erleichterung bei Beschwerden im Intimbereich
- Linderungswirkung bei Gewebeschäden, Juckreiz und Reizungen
- Helfen Infektionen zu verhindern
- Unterstützen den natürlichen Heilungsprozess
- Auch während der Schwangerschaft und nach der Entbindung

Hinweis

Das Gel auf den Multi-Gyn Kompressen kann je nach Erntezeit der Pflanzen durchsichtig, trüb, milchig oder gelblich gefärbt sein. Dies hat keinen Einfluss auf die Wirksamkeit.

Anwendungsgebiete:

- Zur äußerlichen Anwendung im Intimbereich: Damm, Vulva, Schamlippen und Anus.
- Verschaffen schnelle Erleichterung bei Beschwerden wie z.B. Juckreiz, Schwellungen und Reizungen.
- Für eine Behandlung äußerer Analfissuren, Hämorrhoiden und Gewebeerkrankungen
- Unterstützen den natürlichen Heilungsprozess und helfen Infektionen durch geburtsbedingte Gewebeschädigungen (Dammriss oder -schnitt, Überdehnungen) zu verhindern
- Bei Irritationen, die durch Reibung (Textilien, Sport), Binden, allergische Reaktionen, Geschlechtsverkehr oder Verwendung von aggressiven Hygieneprodukten entstanden sind.

Multi-Gyn Kompressen wurden entwickelt, um bei äußeren Beschwerden im Intimbereich Erleichterung zu schaffen. Auf jeder Komresse ist ein bio-aktives Gel aufgetragen. Dieses Gel basiert auf dem patentierten zQR-Komplex, der viele Bakterien hemmt und hilft Infektionen zu verhindern. Die Außenseite der Komresse ist mit einer dünnen Kunststoffschicht überzogen. So wird die Verunreinigung der Wäsche durch das Gel verhindert. Die schützende Komresse kann im Intimbereich (anal und vaginal) platziert werden und fühlt sich weich und angenehm an.

Multi-Gyn Kompressen dienen zur Prävention und Behandlung kleinerer Gewebeschäden wie Reizungen, Ausschläge, überdehntes Gewebe, kleine Risse, Fissuren und Hämorrhoiden. Multi-Gyn Kompressen sind ein Medizinprodukt Klasse IIa mit europäischer Zulassung.

Anwendung:

Verwenden Sie Multi-Gyn Kompressen, wenn Sie Beschwerden wie Gewebeschäden Juckreiz, Empfindlichkeit, Reizungen oder Schwellungen lindern oder vermeiden möchten. Briefchen öffnen, Komresse entfalten und mit der gelgetränkten Seite auf die betroffene Stelle aufliegen. Lassen Sie die Komresse so lange Sie wollen – mindestens aber 10 Minuten - einwirken. Damit die Komresse an ihrem Platz bleibt, empfehlen wir, während der Anwendung enge Unterwäsche zu tragen. Wiederholen Sie die Behandlung mindestens zwei Mal täglich, bis Sie Linderung verspüren.

Multi-Gyn Kompressen innerhalb einer Behandlungsperiode nicht länger als 30 Tage ununterbrochen verwenden, damit sich der Bereich ohne weitere Anwendungen stabilisieren kann.

Beschwerden im äußeren Intimbereich (anal und vaginal) sind häufiger als Sie denken.

Viele Menschen kennen das Problem: Juckreiz, Reizungen, Empfindlichkeit, kleinere Gewebeerkrankungen, Schwellungen und Hämorrhoiden.

Diese Beschwerden können viele verschiedene Ursachen haben, wie: mechanische Reibung (durch Textilien oder durch Sport), Menstruation, Geschlechtsverkehr, Infektionen, alters- oder hormonbedingte Veränderung des Gewebes, Verwendung von zu aggressiven Hygieneprodukten, Nebenwirkungen von Medikamenten oder chronische Verstopfung – übrigens eine häufige Erscheinung auch in der Schwangerschaft und nach der Entbindung. Während dieser Phase ist der Druck auf den gesamten Intimbereich größer als üblich. Dieser Druck verursacht häufig kleine Risse im Gewebe (Analfissuren) oder anschwellende Gefäße (Hämorrhoiden). Während der Entbindung tritt zudem eine Überdehnung des Gewebes auf, die oft Risse und Verletzungen (z.B. Dammriss, Episiotomie) zur Folge hat. Diese kleinen Verletzungen können sehr unangenehm sein. Zudem treten diese Probleme bei vielen Müttern immer wieder auf. Multi-Gyn Kompressen stellen eine wirkungsvolle und natürliche Behandlung für die genannten Beschwerden dar, für Mann und Frau.

Wie Multi-Gyn Kompressen helfen

Das bio-aktive Gel der Kompressen basiert auf dem patentierten zQR-Komplex. Diese natürliche Substanz wird aus Pflanzen gewonnen und enthält Polysaccharid-Moleküle. Das Gel hat die Fähigkeit, die Anlagerung vieler schädlicher Bakterien zu verhindern und neutralisiert diese Bakterien auf natürliche Weise. Zusätzlich zu diesem Schlüsseleffekt, schädliche Bakterien zu hemmen, unterstützen Multi-Gyn Kompressen das natürliche Reparatursystem des Gewebes und verbessern den Allgemeinzustand der Schleimhäute.

Bestandteile:

zQR-complex*, Glycerin, Xanthan Gum, Aldioxa

*patentierter bio-aktiver Polysaccharide www.zQR.com



Die Farbe des bio-aktiven Gels kann von farblos bis bräunlich variieren. Der Grund dafür findet sich beim wesentlichen Inhaltsstoff, dem zQR-Wirkkomplex. Als reines Naturprodukt ist dieser den natürlichen Farbschwankungen unterworfen. Wirksamkeit und Sicherheit des Produkts werden davon jedoch nicht beeinflusst.

Bitte beachten!

- Keine bekannten Wechselwirkungen mit Arzneimitteln.
 - Bei anhaltenden oder häufig wiederkehrenden Beschwerden sollten Sie Ihren Arzt befragen.
 - Allergische Reaktionen auf die Bestandteile von Multi-Gyn Kompressen kommen nur sehr selten vor.
- Sollten Sie allergisch gegen bestimmte pflanzliche Stoffe sein, empfehlen wir Ihnen, eine kleine Menge Gel von den Multi-Gyn Kompressen auf die Innenseite des Unterarms aufzutragen. Treten danach Juckreiz und Rötungen auf, sind Sie wahrscheinlich gegen einen der Bestandteile von Multi-Gyn Kompressen allergisch. Wir empfehlen Ihnen, Multi-Gyn Kompressen dann nicht zu verwenden.

Multi-Gyn Kompressen enthalten natürliche Inhaltsstoffe

Das bio-aktive Gel der Multi-Gyn Kompressen ist ein Produkt auf der Basis des natürlichen bio-aktiven zQR-Komplexes. Es enthält weder Duftstoffe noch Inhaltsstoffe tierischer Herkunft. Es enthält keine aggressiven Chemikalien, Konservierungsstoffe oder Hormone.

Wechselwirkungen mit Arzneimitteln

Multi-Gyn Kompressen weisen keine bekannten Wechselwirkungen mit Arzneimitteln auf.

Schwangerschaft und Stillzeit

Die Anwendung der Multi-Gyn Kompressen während Schwangerschaft und Stillzeit ist möglich. Es sind keine Gegenanzeigen bekannt.

Multi-Gyn ist eine Serie von Produkten zur Vorbeugung und Behandlung verschiedener Beschwerden im Intimbereich.

Bio-aktive Multi-Gyn Produkte nehmen eine interessante Stellung in der persönlichen Intimpflege und Selbstmedikation ein. Multi-Gyn Produkte enthalten den natürlichen, patentierten zQR-Komplex und haben keine bekannten Wechselwirkungen mit Medikamenten.

Weitere Multi-Gyn Produkte für den Intimbereich:

Multi-Gyn FemiWash

Bio-aktiver Mikroschaum für die tägliche Hygiene und zur Intimirasur. Milde und seifenfreie Intimwaschlotion für das natürliche Gleichgewicht im Intimbereich. 100ml, PZN: 04952660

Multi-Gyn LiquiGel

Bio-aktives Vaginalgel bei Scheidentrockenheit. Hormonfrei! 30ml, PZN: 04952654

Multi-Gyn FloraPlus

Bio-aktives, prebiotisches Vaginalgel zur Vorbeugung und Behandlung von Scheidenpilzproblemen. Fördert aktiv die körpereigenen Milchsäurebakterien. In praktischen Einzel-Applikatoren, 5 x 5ml, PZN: 06916208

Multi-Gyn ActiGel

Bio-aktives Gel zur Vorbeugung und Behandlung von bakterieller Vaginose und den damit zusammenhängenden Problemen wie Ausfluss, Geruch, Juckreiz, Reizungen, Empfindlichkeit, Rötungen und Wundheit. 50ml, PZN: 04952648

Multi-Gyn Vaginaldusche

Ergonomisch gestaltete Vaginaldusche zur sanften, inneren Vaginalhygiene, Vorbeugung und unterstützenden Behandlung von Vaginalinfektionen. PZN: 04952737

Multi-Gyn Brausetabletten

Zur Herstellung einer bio-aktiven Vaginalspüllösung. 10 Tabletten, PZN: 04952743

Weitere Informationen unter www.multi-gyn.de

Alleinvertreib in Deutschland:
Ardo medical GmbH
Argelsrieder Feld 10
D-82234 Oberpfaffenhofen
Tel. 08153 / 90 877 - 0
Fax. 08153 / 90 877 - 66
info@ardomedical.de
www.ardomedical.de

Alleinvertreib in Deutschland

Ardo medical GmbH,
Argelsrieder Feld 10,
82234 Oberpfaffenhofen
PZN: 04867635



Hergestellt von:
BioClin BV, Delftechpark 55,
2628 XJ Delft, Niederlande

WWW.MULTI-GYN.DE

CE 0482



AG1701.16
K17